

ENDOCIC.

Инструмент для эндометриальных цитологических исследований (Аспирационная канюля с металлическим стержнем)

Инструкция по применению.

Вставьте ENDOCIC аккуратно через цервикальный канал в полость матки до дна матки. Прочно удерживая оболочку, потяните за зонд до усилия. Это создает отрицательное давление внутри устройства. Оставьте зонд полностью вытянутым. Повращайте или покрутите оболочку вбок между большим и другими пальцами, одновременно двигая наконечник оболочки взад-вперед между дном матки и лобковой костью. Ткань должна заходить в оболочку в процессе. Извлеките устройство и отрежьте наконечник. Медленно задвиньте зонд полностью в оболочку, чтобы вытолкнуть образец в фиксаж. Утилизируйте устройство после использования.

Более подробная информация на blagorostfarma.ru.

ООО «БлагоРост Фарма»