


## ENDORAM

### Кюретка для эндометриальной биопсии для гистологических исследований

COD. 720112

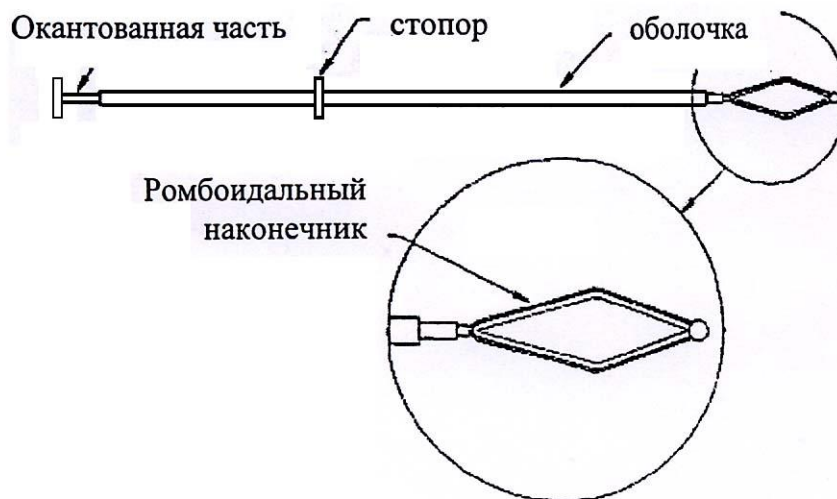

#### Инструкция по применению

Перед началом процедуры, переместите оболочку вперед, чтобы закрыть ромбоидальный наконечник. Оставьте снаружи только маленький шарик. Введите ENDORAM через цервикальный канал в полость матки и потяните назад оболочку, чтобы открыть ромбоидальный наконечник.

Поверните кюретку на 360 градусов влево и вправо и соберите аккуратно соскоб со стенок матки. Переместите оболочку вперед еще раз в исходную позицию. Выньте ENDORAM из матки. Откройте ромбоидальный наконечник и нанесите образец на покрывное стекло или поместите его в пробирку, поболтав кончик кюретки внутри.

#### Внимание

Не превышайте глубины, измеренной гистерометром, чтобы избежать перфорации. Перед использованием прочтите инструкции. Не использовать повторно. Пользуйтесь лишь в том случае, если упаковка не повреждена. Использовать немедленно после открытия. Утилизация после использования производится согласно действующим законам. Для использования только обученным медицинским персоналом.

Более подробная информация на [blagorostfarma.ru](http://blagorostfarma.ru).

ООО «БлагоРост Фарма»